

Informace pro zákazníka

Meditechnik GmbH
Ernst-Befort-Str. 4
35578 Wetzlar, Německo

ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno

Brno, 3. dubna 2012

Bezpečnostní opatření – vzduchové trysky u van ClassicLine (výrobce Meditechnik Německo)

Vážený zákazníku,

Bohužel jsme objevili možný problém se vzduchovou tryskou, která je volitelným příslušenstvím k vaně Classic Line.

Ačkoli má tato tryska TÜV certifikát, nemůžeme vyloučit určité riziko:

V případě těžkého poškození ovládacího panelu (hluboké deformaci zasahující do ovládací elektroniky umístěné pod ovládacím panelem), a současně při situaci, kdy je ovládací panel mokrá a obsluha se dotýká některé uzemněné části vany, existuje možnost úrazu elektrickým proudem. Pravděpodobnost, že nastanou výše zmíněné jevy současně je nízká, nicméně možná.

Pokud ovládací panel nevykazuje známky poškození, můžete vanu i nadále používat bez omezení.

Ovládací panely na všech dotčených vanách vyměníme nejpozději do poloviny května 2012. Servisní technik Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi vhodný termín této výměny.

Omlouváme se za možné komplikace, které Vám toto bezpečnostní opatření může způsobit.

S pozdravem,

Meditechnik GmbH
Dietmar Klas

Lubomír Kachyňa
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno

mail: Lubomir.Kachyna@Arjo.cz
tel.: +420 602 520 299
www.ArjoHuntleigh.cz