

V Praze dne 18. 4. 2012

Vážený zákazníku,

Prosíme, věnujte pozornost následujícímu sdělení.

Bezpečnostní oznámení

***Vápníková (Ca++) membránová souprava, katalogové číslo 942-046 a 942-060
Použití s přístroji řady ABL505/555, EML105, ABL600, série ABL700 a ABL800***

Problém, který nás vedl k vydání bezpečnostního oznámení číslo 915-291 byl vyřešen.

Toto bezpečnostní oznámení se vztahovalo pro následující **produkty firmy Radiometer**:

Vápníková (Ca++) membránová souprava, katalogové číslo 942-046 a 942-060

Popis vyřešení problému:

Již dříve jsme vás informovali, že při výměně vápníkové Ca++ membrány bylo nutné použít postup odlišný od popsaného v Návodu k obsluze.

Odstranili jsme problém, který vedl k původnímu bezpečnostnímu oznámení a jsme rádi, že Vás můžeme informovat, že můžete opět použít **standardní postup v Návodu k obsluze** pro:

- **942-046:** Vápníkové Ca++ membránové soupravy, číslo šarže **R0327 (uvolněno k prodeji 18. 8. 2011) nebo vyšší**
- **942-060:** Vápníkové Ca++ membránové soupravy, číslo šarže **R0288 (uvolněno k prodeji 3. 8. 2011) nebo vyšší**

Pokud jsou čísla šarže vaší vápníkové Ca++ membránové soupravy shodná s výše uvedenými či pozdějšího data, **není** již nutné namáčet membránu v proplachovacím roztoku, provádět extra kontrolu kvality k ověření stavu vápníkových Ca++ membrán či nastavovat manuálně limity kvality kontroly při instalaci nových šarží roztoků kvality.

Vezměte prosím na vědomí, že ani v případě, když budete i nadále provádět tyto dočasné postupy, nebude to mít vliv na měření ionizovaného vápníku Ca++.

Pokud jde o úpravu limitů roztoků kontroly kvality pro následující kontrolní materiály:

- Qualicheck4+: S7440 (hladina 2) a S7450 (hladina 3)
- Qualicheck5+: S7740 (hladina 2) a S7750 (hladina 3)
- Autocheck5+: S7745 (hladina 2) a S7755 (hladina 3)
- Autocheck6+: S7845 (hladina 2) a S7855 (hladina 3)

Doporučujeme pro analyzátory řady ABL505/555 a řady ABL600 neměnit horní a dolní limity před výměnou za kontroly kvality s jinou šarží, protože změna těchto limitů by vymazala statistiku kontroly kvality pro konkrétní hladinu.

Omlouváme se za případně způsobené nepříjemnosti, které Vám toto mohlo způsobit.

V případě dalších dotazů kontaktujte firmu RADIOMETER s.r.o. či svého obchodního zástupce pro tuto společnost.

S pozdravem,

RADIOMETER s.r.o.

