

SYSTÉM ZÁSTĚN SILENTIA

Datum: 26-06-2012
Týká se produktů: Veškeré produkty systému zástěn Silentia
Typ akce: Změna v návodu k použití

Vysvětlení

U některých modelů postelí, jejichž části v dolní poloze postele vyčnívají pod zástěnu, může docházet k problémům. Pokud v případě zvednutí postele dojde ke zvednutí i těchto vyčnívajících částí, může dojít k silnému tlaku zespodu na zástěnu, k nadzdvihnutí zástěny a k poškození upevňovacích prvků. Zástěna se tak může uvolnit a přepadnout. Zástěna může spadnout ihned nebo později, při další manipulaci. V minulosti se již několikrát stalo, že zástěna z tohoto důvodu spadla. V těchto případech se naštěstí nikomu nic nestalo, ale i tak jsme se rozhodli přidat do návodu k použití varování uvedené níže. Největší nebezpečí představují postele, které mají elektrický zdvihový mechanismus.

Doporučení pro uživatele



Žádáme uživatele, aby vzali na vědomí následující varování v návodu k použití.

Než zvednete do zvýšené pozice postel, která se nachází v blízkosti zástěny, zkontrolujte, zda některá část postele nezasahuje pod zástěnu. Při zdvihání postele by mohlo dojít k poškození zástěny, jejího příslušenství a upevňovacích prvků. Mohlo by také dojít k uvolnění a přepadnutí zástěny a ke zranění pacientů nebo personálu.

Zástěny Silentia jsou označeny logem společnosti Silentia v horní části produktu.



Rozesílání tohoto bezpečnostního upozornění

Toto bezpečnostní upozornění je nutné rozeslat všem pracovníkům, kterých se týká, a všem zástupcům dalších společností, kteří obdrželi produkty představující výše zmíněné riziko. Vyplňte prosím přiložený formulář s potvrzením (v případě potřeby jej zkopírujte) a do 30 dnů jej zašlete svému obchodnímu zástupci.



Kontaktní informace

Další informace vám sdělí váš obchodní zástupce nebo výrobce.

Prodejce:

LABO-MS, spol. s r.o.
Petržilkova 2491/56
CZ-158 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 251 624 035
Fax: +420 251 624 039
E-mail: labo-ms@labo-ms.cz

Výrobce:

Silentia AB
Box 108
SE-311 22 Falkenberg
Švédsko

Telefon: +46(0)346 485 80
Fax: +46(0)346 485 89
E-mail: qc@silentia.se

Příslušné úřady byly o tomto bezpečnostním upozornění informovány.

Omlouváme se za všechny případné nepříjemnosti, které vám toto bezpečnostní upozornění způsobí, a doufáme, že naše jednání pochopíte.

Örjan Göranson/CEO

Příloha:

Formulář s potvrzením



Potvrzení

Potvrzuji tímto, že společnost _____ obdržela důležité bezpečnostní upozornění od společnosti Silentia s datem 26-06-2012 a rozeslala je podle uvedených pokynů.

_____ (jméno, pozice)

_____ (místo, datum)

Zašlete prosím toto vyplněné potvrzení e-mailem, faxem nebo poštou společnosti LABO-MS na adresu:

E-mail: labo-ms@labo-ms.cz

Fax: +420 251 624 039

Adresa: LABO-MS, spol. s r.o.
Petržilkova 2491/56
CZ-158 00 Praha 5
Česká republika

