

Jméno
Sektor
Divize
Oddělení

Michal Čech
Healthcare
Diagnostics

Telefon
Fax
Mobil

+420 233 032 070
+420 549 211 465
+420 602 694 950

E-mail
Datum

michal.cech@siemens.com
13. 8. 2012

Informace zákazníkům:

Dimension® RxL, ExL - Reagent Management System (RMS) uchycení síťového kabelu

– Vážený zákazníku,

Podle našich zázamů je jako součást analyzátoru Dimension® instalován ve Vaší laboratoři Reagent Management System (RMS). Společnost **Siemens Healthcare Diagnostics** si dovoluje upozornit, že pokud je síťový kabel do RMS uchycen pouze částečně, může to způsobit přehřátí a následný požár. Toto upozornění se týká RMS se síťovým kabelem bez drátěné pojistky (viz přiložené obrázky).



Síťový kabel s
pojistkou



Síťový kabel bez
pojistky

Siemens, s.r.o.
Management: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare



Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatelé: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700



Varování: Pouze částečné uchycení síťového kabelu může způsobit přehřátí a následný požár.

Je možno používat i nadále síťový kabel bez pojistky. Zkontrolujte prosím, zda je RMS ve Vaší laboratoři vybaven síťovým kabelem s pojistkou nebo bez ní a ověřte prosím jeho uchycení.

Sevisní technici naší společnosti byli o této záležitosti informováni a při nejbližší příležitosti síťový kabel zkontrolují případně dovybaví pojistkou

Pokud budete mít další dotazy, kontaktujte prosím naši technickou podporu nebo Vašeho regionálního zástupce..

Velmi si vážíme Vaší podpory a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

S přátelským pozdravem

Michal Čech
Aplikační specialista pro klinickou chemii

Siemens, s.r.o.

Management: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare
Management: Ing. Jiří Pavlíček



Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatel: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika

IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1

Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700