
Naléhavé bezpečnostní upozornění

Předmět: Lůžko Affinity™ Four—inovace brzdíček

Identifikátor FSCA: Mod 471

Typ akce: Modifikace zařízení

Datum: 2. dubna 2012

Komu: generální ředitel
správce podniku
technik podniku
manažer dozoru
biomedicínské inženýrství
dispečer lékařského zařízení

Dotčené produkty:

Modely: Porodní lůžko Affinity™ Four (P3700B/C/D)

Rozsah dotčených výrobních čísel: H331AA4785 až N081AA7966

Data výroby: před 21. březnem 2012

Popis situace:

Společnost Hill-Rom zjistila, že u některých porodních lůžek Affinity™ Four, vyrobených v období vymezeném výše uvedenými daty, mohou nastat potíže s brzdíčkami. To může vést k nežádoucímu pohybu.

Způsob řešení:

Vyvinuli jsme pro tato lůžka vylepšený systém brzdíček a přijedeme do vašeho zařízení příslušná lůžka upravit.

Dokud k vám nepřijedeme, postupujte následujícím způsobem:

- Vyhledejte příslušná lůžka uvedená v tomto upozornění.
- Vyzkoušejte brzdíčky:
 - Po zabrzdění lůžko tlačte a tahejte za něj v opačných rozích, abyste se ujistili, že brzdíčky drží lůžko.
 - Po odbrzdění lůžka zkontrolujte, zda je brzdová páčka umístěná buď rovně (neutrální poloha) nebo v přepravní poloze a zda lze s lůžkem snadno pohybovat.
- Pokud brzdíčky přesto nebrzdí nebo nefungují normálním způsobem, vyřadte lůžko z provozu do doby, než provedeme úpravu brzdíček.
- Abyste se ujistili, že brzdíčky fungují správně, proveďte pravidelnou roční preventivní údržbu (PM) lůžek Affinity® podle popisu v Servisní příručce. Provádění **pravidelného programu preventivní údržby je zásadním krokem** nezbytným pro zajištění správné funkce lůžek Hill-Rom.



Distribuce tohoto bezpečnostního upozornění:

Předejte kopii tohoto dopisu všem dalším příslušným osobám ve vašem zařízení.

Kontaktujte odpovědnou osobu:

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se tohoto požadavku nebo popsání postupu, obraťte se na technickou podporu společnosti Hill-Rom ve vaší zeměpisné oblasti podle přiloženého seznamu.

S pozdravem,

Oddělení technické podpory společnosti Hill-Rom