



Terumo[®] Advanced Perfusion System 1

Ultrazvukový vzduchový senzor

Dodatek

Tento dodatek obsahuje informace použití systému pro detekci vzduchových bublin Terumo[®] Advanced Perfusion System 1.

Tento dodatek ovlivňuje část Moduly – detekce vzduchových bublin (ABD).

V případě výskytu alarmu – vzduch

Je-li alarm pro přítomnost vzduchu před kardiopulmonálním bypassesem:

- Zkontrolujte, zda v okruhu není vzduch.
Resetujte vzduchový senzor a restartujte pumpy (pumpy), je-li to zapotřebí.
- Pokud alarm přetrvává nebo se opakuje, i když vzduch není přítomen, zkontrolujte následující položky v sestavení:
Zkontrolujte, zda je hadička správně umístěná uvnitř senzoru a západka je úplně a bezpečně uzavřená.
Zkontrolujte, zda je kabel vzduchového senzoru správně připojen jak k senzoru, tak k modulu ABD.
- Pokud jste v sestavení nenašli žádný problém, zvažte možnost použití záložního systému detekce vzduchu.
- Kontaktujte Terumo zákaznický servis.

Je-li alarm pro přítomnost vzduchu během kardiopulmonálního bypassu:

- Podle potřeby zastavte arteriální a/nebo kardioplegickou pumpu.
POZOR: Pokud při zastavení arteriální pumpy nezastavíte kardioplegickou pumpu, může v závislosti na sestavení okruhu dojít k infuzi vzduchu do okruhu.
- Podle potřeby zasvorkujte hadičku.
- Zkontrolujte přítomnost vzduchu a odstraňte vzduch, je-li třeba.
- Resetujte alarm a restartujte pumpu.
- Pokud se alarm neresetuje:
Deaktivujte vzduchový senzor nastavením **OFF** (vypnuto) na podzáložce CCM ADB. Bude nutno použít alternativní metodu monitorování přítomnosti vzduchu.
Pokud možno použijte záložní ultrazvukový vzduchový senzor a kabel.
- Po dokončení případu kontaktujte Terumo zákaznický servis.



Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Ann Arbor, Michigan 48103-9300
(734) 663-4145 or (800) 262-3304 for technical information.
(800) 521-2818 for ordering information.

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium

AU Sponsor Terumo Corporation Australian Branch
NSW 2113, Australia

Terumo Corporation
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0072, Japan

826623 R/A
May, 2012