

Terumo® Advanced Perfusion System 1

Centrální ovládací monitor (CCM)

Doplněk

Tento Doplněk obsahuje informace o použití Terumo® Advanced Perfusion System 1.

Tento Doplněk mění část „Centrální ovládací monitor (CCM)“.

Displeje a ovládací prvky

Každý Modul a Čerpadlo pro Terumo System 1 provádí vlastní sledování. Pokud jeden Modul nebo Čerpadlo zjistí vnitřní chybu na jednom základním konektoru, zobrazí ikonu Rozbitý modul.

Pokud má během perfúze jeden Modul nebo Čerpadlo červení X na své ikoně

- Je postižen pouze daný Modul nebo Čerpadlo.
- Dle potřeby přiřaďte záložní Čerpadlo nebo Modul připojený do jiného konektoru.
- Dle potřeby dokončete perfúzi pomocí záložního zařízení.
- Kontaktujte službu zákazníkům Terumo.

Ikona/Displej	Zařízení	Činnost při stisku
	Rozbitý modul	Otevře dílčí kartu Přiřadit modul

Obrázek 1: Rozbitý modul, viz Příručka obsluhy str. 4 - 7

Pokud je během perfúze na více ikonách Čerpadlo nebo Modul červené X anebo „?“

- Pokud je na více ikonách Čerpadlo nebo Modul najednou nebo postupně v krátkém časovém období ikona Rozbitý modul, mohla selhat součást Báze systému. To může ovlivnit všechna Čerpadla nebo Moduly.
- Dle potřeby použijte k dokončení perfúze záložní srdeční a plicní pumpu.
- Kontaktujte službu zákazníkům Terumo.