

Terumo[®] Advanced Perfusion System 1 Moduly

Doplněk

Tento Doplněk obsahuje informace o použití Modulu ABD a Modulu okluderu v rámci Terumo Advanced Perfusion System 1.

Tento Doplněk mění část „Moduly“.

V případě poruchy Modulu ABD:

Symptomy	Jak reagovat
V případě selhání systému ABD vlivem vadné součásti objevit následující symptomy: - Na displeji místního čerpadla se zobrazí zpráva „ZKONTROLUJTE VZDUCHOVÝ SENZOR“. CHECK AIR SENSOR - Ikona ABD na Centrálním ovládacím monitoru (CCM) zůstane „zelená“, bliká na ní otazník.  - LED na modulu střídá zelenou, žlutou, červenou barvu se zhasnutím.	- Vyměňte Modul ABD a přiřaďte záložní modul. viz část CCM v uživatelské příručce, strana 4-32. Může být nutná pomoc dalšího člena týmu. - Pokud nemáte záložní modul ABD, musíte do ukončení případu vyvinout zvláštní obezřetnost. - Pokud využíváte volitelný okruh s rezervoárem: jakékoli selhání bezpečnostního systému by mělo vést k úvaze, zda není vhodné přejít na okruh s žilním rezervoárem. - Po ukončení případu kontaktujte službu zákazníkům Terumo.
Při tomto selhání se <u>mohou</u> ale <u>nemusí</u> objevit následující symptomy: - Čerpadlo se může zastavit/doběhnout/ pozastavit bez jakékoli zvukové nebo optické výstrahy. - Systém ABD může aktivovat svou zvukovou výstrahu. - Systém ABD může aktivovat svou optickou výstrahu.	- Po ověření, že v okruhu není vzduch, znovu spustíte čerpadlo. - Vyměňte modul ABD a znovu přiřaďte záložní modul. Viz část CCM v uživatelské příručce, strana 4-32. Může být nutná pomoc dalšího člena týmu. - Pokud nemáte záložní modul ABD, musíte do ukončení případu vyvinout zvláštní obezřetnost. - Pokud využíváte volitelný okruh s rezervoárem: jakékoli selhání bezpečnostního systému by mělo vést k úvaze, zda není vhodné přejít na okruh s žilním rezervoárem. - Po ukončení případu kontaktujte službu zákazníkům Terumo.

V případě selhání Modulu okluderu:

Symptomy	Jak reagovat
Systém uživatele upozorní na nefunkční okluder. - CCM zobrazí bílé hlášení 'připojte okluder' a okluder zůstane v aktuální poloze. - Blikající žluté hlášení '<Jméno okluderu>: PROVEĎTE SERVIS MODULU' je doprovázeno tónem a okluder zůstane v aktuální poloze. - Na ikoně okluderu na CCM je otazník. 	Odjistěte a otevřete víko okluderu, vyjměte trubičku a regulujte průtok v trubičce svorkou. - Vyměňte modul okluderu a znovu přiřaďte záložní modul. Viz část CCM v uživatelské příručce, strana 4-32. Může být nutná pomoc dalšího člena týmu. - Pokud nemáte záložní modul okluderu, musíte do ukončení případu vyvinout zvláštní obezřetnost. <u>Pokud využíváte volitelný okruh s rezervoárem:</u> - jakékoli selhání bezpečnostního systému by mělo vést k úvaze, zda není vhodné přejít na okruh s žilním rezervoárem - Pokud není k dispozici venózní rezervoár, zvýšte pozornost a připravte se při zastavení/doběhnutí čerpadla po upozornění na vzduch ručně zasvorkovat vedení. Po ukončení případu kontaktujte službu zákazníkům Terumo.