

Jméno
Sektor
Divize
Oddělení

RNDr. Blanka Chmelíková
Healthcare
Diagnostics

Telefon
Fax
Mobil
E-mail

+420 23303 2070
+420 549 211 465
blanka.chmelikova@siemens.com

Váš dopis
Naše značka
Datum

11. 12. 2012

Nápravné opatření:

- **Kontroly pro chemické stanovení moči**
Vliv teploty na pozitivní močové kontroly CLINITEK Atlas® a Chek-Stix®

Vážený zákazníku,

dle našich záznamů jste pravděpodobně obdrželi alespoň jednu kontrolu pro chemické stanovení moči CLINITEK Atlas® pozitivní kontrola, Chek-Stix® Combo Pak a Chek-Stix® pozitivní kontrola.

Produkt	Obj. číslo	SMN	Šarže balení	Šarže láhvičky
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S9093061B	P9093061B
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S9094081B	P9094081B
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S0097091B	P0097091B
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S0100101C	P0100101C
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S0103042F	P0103042F
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S0106062B	P0106062B
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S9101022D	P9101022D
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S9105052B	P9105052B
Chek-Stix Positive Control	1360	10310482	S9108092A	P9108092A
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9093061C	P9093061C
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9094081J	P9094081J
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0096091F	P0100101D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0097091E	P0097091E

Siemens, s.r.o.
Management: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare



Siemsenova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatelé: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Sídlo: Siemsenova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700

Produkt	Obj. číslo	SMN	Šarže balení	Šarže láhvičky
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0098101F	P9101022E
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0099091D	P0099091D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0100101E	P0100101E
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0102012B	P9101022H
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0102012D	P9101022J
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0103042B	P0103042B
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0103042G	P0103042G
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0106062D	P0106062D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9105052C	P9105052C
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S9093061A	P9093061A
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S9094081A	P9094081A
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S0097091C	P0097091C
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S0100101B	P0100101B
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S0103042A	P0103042A
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S0103042H	P0103042H
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S0106062A	P0106062A
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S9101022A	P9101022A
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S9101022B	P9101022B
CLINITEK Atlas Positive Control	5019	10311124	S9105052A	P9105052A
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0099091B	P0099091B
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0100101G	P0100101G
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0103042E	P0103042E
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0099091A	P0099091A
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0100101H	P0100101H
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0103042C	P0103042C
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0099091C	P0099091C
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0100101F	P0100101F
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0102012C	P9101022I
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0103042D	P0103042D
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0106062E	P0106062E
Chek-Stix Positive Control	1360L	10331652	S9094081C	P9094081C

Siemens, s.r.o.
Management: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare



Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatelé: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700

Produkt	Obj. číslo	SMN	Šarže balení	Šarže láhvičky
Chek-Stix Positive Control	1360L	10331652	S0100101A	P0100101A
Chek-Stix Positive Control	1360L	10331652	S9101022C	P9101022C

Když jsou tyto šarže kontrolního materiálu rozpuštěny a vystaveny teplotě nad 25°C, může se u pozitivní kontroly vyskytnout výsledek leukocytů jako negativní.

Po rozpuštění pozitivního kontrolního materiálu je jeho použitelnost až 8h, pokud je roztok skladován při teplotě 25°C nebo nižší. Pokud je teplota větší než 25°C a menší než 30°C, může být roztok použit jen dvě hodiny po rozpuštění.

Tato informace platí pro použití kontrol na všech analyzátorech CLINITEK i pro vizuální odečítání.

Nebylo prokázáno žádné zdravotní riziko. Není potřeba kontrolovat dříve měřené výsledky nebo testování opakovat.

Omlouváme se za možné nepříjemnosti a vážíme si Vaší trpělivosti.

S pozdravem,

Siemens s.r.o.
Divize H DX

RNDr. Blanka Chmelíková
Ředitelka divize H DX

Siemens, s.r.o.
Management: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Sektor Healthcare



Siemensova 1
155 00 Praha 13
Česká republika

Tel: +420 23303 2001
Fax: +420 23303 2008
www.siemens.com/entry/cz/cz

Siemens, s.r.o. - Jednatelé: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Dipl. Kfm. Rudolf Fischer - registrace v ob. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
Č. účtu CZK: 1013384001/2700, č. účtu EUR: 1013384394/2700