

### Analyzátory RAPIDPoint® 500

#### Chybové kalibrace $pO_2$ u měřících kazet na analyzátorech RAPIDPoint® 500

Informujeme Vás o možnosti výskytu chybových hlášení u  $pO_2$  parametru měřících kazet určených pro analyzátory RAPIDPoint® 500. U měřících kazet se při kalibraci může objevit chybové hlášení D3, tímto nedojde ke kalibraci parametru a systém nevydá žádné výsledky pacienta.

Mohou být ovlivněny měřící kazety těchto objednacích čísel: 10491447, 10491448 a 10491449.

Uvedené opatření se týká měřících kazet pro systémy RAPIDPoint® 500 níže uvedených výrobních čísel:

**2330201012 až 2330901917**

**a**

**2332300913 až 2333004925**

**Poznámka: chybové hlášení D3 se objevují pouze u měřících kazet analyzátorů RapidPoint® 500. Netýká se měřících kazet pro systémy RAPIDPoint® 400 a RAPIDPoint® 405.**

V současné době je omezena výroba měřících kazet pro systémy RAPIDPoint® 500. Není nutné se obávat výpadku v dodávkách měřících kazet, protože pro systémy RAPIDPoint® 500 je možné dodat měřící kazety určené pro analyzátory RapidPoint® 405, které jsou uvedeny v tabulce.

| Měřící kazety<br>objednací číslo: | Popis                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 10310469                          | RAPIDPoint 405 (750 testů) |
| 10313971                          | RAPIDPoint 405 (400 testů) |
| 10283222                          | RAPIDPoint 405 (250 testů) |

Měřící kazety pro RAPIDPoint® 405 ovšem nejsou schopny měřit laktát. Je potřeba si v tom případě zajistit měření laktátu na jiném systému ve Vaší laboratoři.

Firma Siemens se pokouší obnovit výrobu tak, aby byly pokryty všechny Vaše požadavky. Pokud jste obdrželi kazetu, které se týká toto nápravné opatření, kazetu zlikvidujte a kontaktujte firmu Siemens. Bude Vám poskytnuta náhrada.

Omlouváme se za způsobené komplikace. Děkujeme Vám za trpělivost a podporu.

#### Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

511 Benedict Ave.  
Tarrytown, NY 10591

914-631-8000  
www.siemens.com/diagnostics

Page 1 of 2

**Faxová návratka bezpečnostního opatření POC 14-002**

**Chybové kalibrace pO<sub>2</sub> u měřících kazet na analyzátorech RAPIDPoint® 500**

Tato faxová návratka slouží jako potvrzení, že jste obdrželi bezpečnostní opatření z prosince 2013 - Chybové kalibrace pO<sub>2</sub> u měřících kazet na analyzátorech RAPIDPoint® 500. Prosím, přečtěte si uvedené otázky, vyznačte odpovědi a poté zašlete faxovou návratku na číslo faxu uvedené na konci této návratky, nebo na e-mail [tereza.kovacikova@siemens.com](mailto:tereza.kovacikova@siemens.com)

Potvrzují přečtení tohoto bezpečnostního opatření a také porozumění Ano ☐ Ne ☐  
všem uvedeným pokynům.

Jméno zodpovědné osoby:

\_\_\_\_\_

Titul: \_\_\_\_\_

Pracoviště: \_\_\_\_\_

Ulice: \_\_\_\_\_

Město: \_\_\_\_\_ Stát: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Prosím zašlete tuto faxovou návratku zpět na číslo faxu: +420 549 211 465