


Naléhavé bezpečnostní oznámení

Bezpečnostní varování pro závěsné popruhy a akrální úchyty s D kroužkem, který je uchycený červeným proužkem.

Date: 2014-03-20
FSCA-identifier Hdir ref 14/1692
Type of action: Device exchange

Urgent Safety Information:

Detally na poškozeném zařízení :

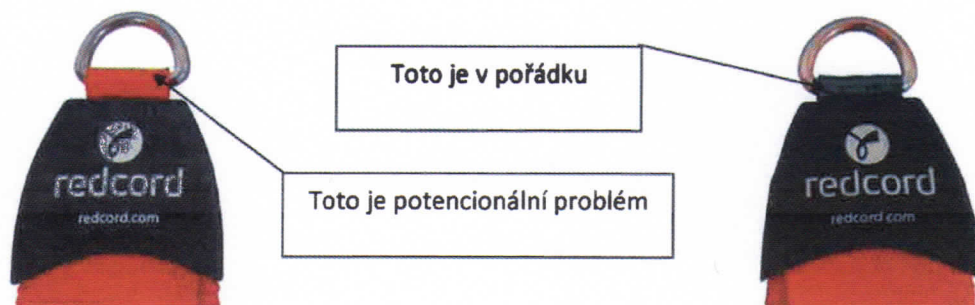

(obrázek 1)

Redcord radí všem svým zákazníkům, kteří si zakoupili popruhy a akrální úchyty vyrobené v období mezi lety 2009 a 2011, aby si okamžitě zkontrolovali materiál, který spojuje D kroužek s popruhem.

Toto se týká pouze případu, kdy popruhy a akrální úchyty mají plastovou koncovku s logem a červený materiál je přidělaný ke zbytku pásku (viz. obrázek č.1 nahoře). Jestliže popruhy spojující D kroužek mají šedou barvu, pak je vše v pořádku. Tento šedivý materiál obsahuje kvalitní UV ochranu.

Poškozené výrobky:

12130 Redcord akrální popruh s úchyty
12024 Redcord akrální popruh
12043 Redcord pánevní popruh
12042 Redcord terapeutický popruh
12037 Redcord krční popruh
14052 Redcord držák do dveří

Redcord AS
P O Box 55
NO-4920 Staubo
Norway
phone +47 37 05 97 70
fax +47 37 05 97 80
NO 960 304 977 MVA

www.redcord.com

Popis problému:

Redcord obdržel zprávy, že červený materiál spojující D kroužek s další částí popruhů, může mít nedostačující kvalitu- chybějící UV ochranu materiálu. Jestliže tyto popruhy byly vystaveny slunečnímu záření delší dobu, pak mohlo dojít ke snížení pevnosti materiálu (vyšisování slunečním zářením) a mohl by prasknout v momentě, kdy je zatížen klientem.

Doporučení pro uživatele:

Žádáme všechny zákazníky a uživatele, kteří vlastní výše zmíněný typ, aby provedli následující bezpečnostní test a vyzkoušeli popruhy. (viz. obrázek č.2 dole)



(obrázek 2)

Pokud naleznete jakékoli známky nižší kvality pevnosti materiálu, pak Vám Redcord nabízí možnost výměny těchto popruhů a akrálních úchytů za nové, které již mají UV ochranu. Tato nabídka je platná po celý rok 2014 nebo 5 let od zakoupení výrobku.

Pro doplňující informace nebo otázky týkající se daného problému, prosím kontaktujte našeho distributora Redcord.

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti distributorům, zákazníkům, a uživatelům.

Tuto zkoušku však doporučujeme i pro výrobky, které nejsou takto poškozené. Pravidelné testování odolnosti a pevnosti je také vhodné.

Prosím přečtěte si naše doporučení na: www.redcord.com/safety

Redcord AS
P O Box 55
NO-4920 Staubo
Norway
phone +47 37 05 97 70
fax +47 37 05 97 80
NO 960 304 977 MVA

www.redcord.com

Rozeslání naléhavého bezpečnostního oznámení:

Toto oznámení je nezbytně nutné předat všem organizacím, které by měly být informovány nebo společností, u kterých by potenciálně hrozilo riziko této závady. Prosím věnujte pozornost tomuto oznámení plynoucí z tohoto problému po náležitou dobu a ujistěte se o efektivnosti nápravného opatření.

Děkujeme za Vaši důkladnou pozornost týkající se uvedené skutečnosti a Vaši další spolupráci.

Referenční osoba:

Eirik Lynghaug

President / CEO

Redcord AS

Kontaktní osoba:

Alice Hamáčková

jednatelka

Ahama s.r.o.

Podpisy potvrzují, že tato zpráva byla oznámena příslušnému Regulačnímu Úřadu.

(Closing paragraph)

Podpis

Podpis

Redcord AS

P O Box 55
NO-4920 Staubo
Norway
phone +47 37 05 97 70
fax +47 37 05 97 80
NO 960 304 977 MVA

www.redcord.com