

## Příloha k Orthoralix DDE k návodu na použití


Prosím, přiložte si tyto instrukce k Vašemu návodu na použití

Pokud se během provozu přístroje Orthoralix DDE stane, že obdržíte z přístroje viditelně zdeformovaný snímek, prosím následujte instrukce níže k opětovnému přeposlání snímku do Vašeho zobrazovacího softwaru. K tomuto procesu již není zapotřebí opakovaně snímkovat pacienta.

1. V systémové liště na počítači, který je připojen na Vaše Orthoralix zařízení klikněte levým tlačítkem myši na iconu DDE.



2. V následujícím otevřeném okně zvolte „Last Image“ záložku. V okně „Last Image“ naleznete „Resend“ tlačítko. Klikněte na „Resend“ tlačítko a poslední snímek ze zařízení se přepoše znovu do Vašeho zobrazovacího softwaru.

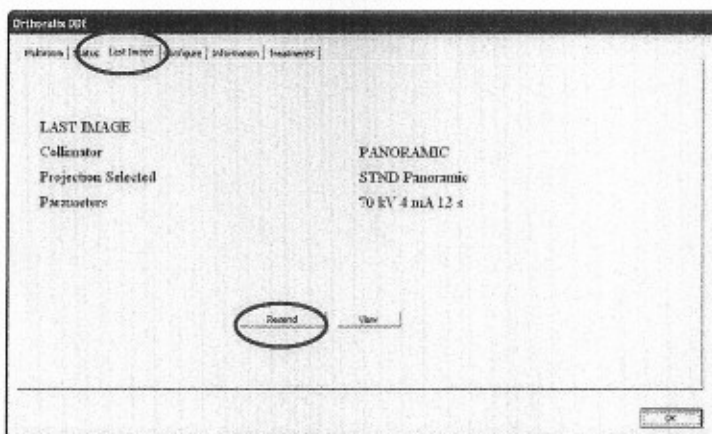

Poslední snímek pacienta může být zaslán za předpokladu, že Váš přístroj Orthoralix není vypnut, nebo nebyl již proveden další snímek pacienta. Opětovným posláním snímku je možné, že se zdeformovaný snímek zobrazí znovu již správně. Není žádné omezení na počet opakovaných přeposlání snímku.

Cone Beam 3D Imaging Systems  
Panoramic X-ray Systems  
Intraoral X-ray Systems  
Digital Intraoral Sensors  
Digital X-ray Phosphor Plates  
Intraoral Cameras  
Imaging Software