

<p align="center">Popis změn softwaru u přístrojů HomeChoice a HomeChoice Pro Systémy pro automatizovanou peritoneální dialýzu (Softwarová verze 10.4)</p>	
Programování	
<i>Sesterské menu</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Vymažte hmotnost 	Všichni uživatelé budou vyzváni zadat svoji hmotnost v nabídce „ZMĚNA PROGRAMU“. Volba „VYMAŽTE HMOTNOST“ je nyní dostupná v <i>Sesterském menu</i> . Při použití v centrech/ nemocnicích doporučujeme, aby byla tato volba nastavena na „ANO“.
<ul style="list-style-type: none"> Tidal úplné vypouštění 	„TIDAL ÚPLNÉ VYPOUŠTĚNÍ“ je nyní nastaveno na „ANO“.
<i>Změna programu</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Povolený rozsah Tidal 	Povolený rozsah „TIDAL OBJEM %“ je nyní 40% - 95%. Pro <i>standardní režim</i> a <i>režim malé náplně</i> byla změněna hodnota „CELKOVÝ OBJEM UF“ a povolené rozsahy. Nastavení „TIDAL ÚPLNÉ VYPOUŠTĚNÍ“ bylo změněno z 1 na 3.
<ul style="list-style-type: none"> Nastavení hmotnosti 	Hlášení „ZKONTROLUJTE HMOTNOST PACIENTA“ se objeví, pokud je naprogramovaný objem pacientovy náplně vyšší než maximální objem náplně povolený pro jeho zadanou hmotnost.
<i>Provádění nastavení</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Alarm počátečního vypouštění 	Alarm počátečního vypouštění (ALARM POČÁT.VYPOUŠTĚNÍ) je nyní automaticky nastaven na 70% hodnoty <i>Objemu poslední náplně</i> nebo aktuálního nastavení, podle toho, která hodnota je vyšší. Hlášení „OVĚŘTE POČ.VYPOUŠTĚNÍ“ se objeví, pokud je objem „ALARMU POČÁT.VYPOUŠTĚNÍ“ < 70% <i>Objemu poslední náplně</i> nebo < 25% <i>Denní</i> nebo <i>Noční náplně</i> .

<ul style="list-style-type: none"> • Poslední manuální vypouštění 	Poslední manuální vypouštění (POSL.MANUÁLNÍ VYPOUŠTĚNÍ) nyní umožňuje "ANO".
Provádění léčby	
<i>Zahájení léčby</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Proplachování jednorázového setu 	Jako další informace poskytnuta uživateli se nyní střídá nové hlášení „ OTEVŘETE TLAČKY “ s hlášením „ PŘIPOJTE VAKY “.
<ul style="list-style-type: none"> • Založte znovu set 	Jako další informace poskytnuta uživateli se nyní střídá nové hlášení „ ZAVŘETE VŠECHNY TLAČKY “ s hlášením „ ZALOŽTE ZNOVU SET “.
<i>Provádění léčby</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Překlenutí/obejití počátečního vypouštění 	Počáteční vypouštění nemůže být obejito pokud se objeví hlášení „ MALÝ VYPOUŠTĚNÝ OBJEM “. Při obcházení se také objeví nová hlášení oznamující pacientovi před povolením překlenutí nastavení jeho <i>Alarmu vypouštění</i> a hlášení „ VYPOUŠTĚNÍ NESKONČILO “.
<ul style="list-style-type: none"> • Překlenutí/obejití vypouštění 	V průběhu obcházení/překlenování vypouštění se také objeví nové hlášení pro pacienta, který se rozhodl vybrat překlenutí.
<ul style="list-style-type: none"> • Částečný objem náplně 	Částečný objem náplně bude dodán poté, co nebylo dokončeno úplné vypouštění díky obejití hlášení „ POZOR: NEGATIVNÍ UF “.
<ul style="list-style-type: none"> • Tidal vypouštěcí fáze 	Hlášení „ POZOR: NEGATIVNÍ UF “ se objeví na konci každého cyklu pokud existují podmínky pro negativní UF
<ul style="list-style-type: none"> • Alarm <i>Pomalý tok vypouštění</i> 	Alarm „ POMALÝ TOK VYPOUŠTĚNÍ “ nemůže být obejit.
<i>Ukončení léčby</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vysoké vypouštění 	Pokud dojde k vysokému vypouštění, které indikuje nechtěný IIPV (zvýšený intraperitoneální objem) objeví se hlášení „ VYSOKÉ VYPOUŠTĚNÍ “. Toto hlášení se střídá s hlášením „ KONTAKT. PD SESTRU “.

<ul style="list-style-type: none">• Nízká UF	<p>„<i>POSL.MANUÁLNÍ VYPOUŠTĚNÍ</i>“ je nastaveno na “ANO”. Hlášení „<i>NÍZKÁ UF</i>“ se objeví, pokud je „<i>POSL.MANUÁLNÍ VYPOUŠTĚNÍ</i>“ je nastaveno na “ANO” a cílová hodnota UF nebyla před posledním napouštěním dosažena.</p>
--	---

