

25. července 2011

## **URGENTNÍ – OPRAVNÉ POKYNY K LÉKAŘSKÉMU PŘÍSTROJI**

### **Zdravotnické patientské monitory Spacelabs Medical (modely 91367, 91369, 91370, 91387 a 91393) vybavené perioperačním doplňkem**

Vážení správci nemocnice, vedoucí oddělení biomedicíny,

tímto dopisem Vás chceme informovat o možném nebezpečí spojeném s používáním patientských monitorů společnosti Spacelabs Healthcare – modelů 91367, 91369, 91370, 91387 a 91393, které jsou vybaveny perioperačním doplňkem (-D). Podle našich záznamů jste od nás obdrželi jeden nebo více takových přístrojů.

Byli jsme informováni o možném bezpečnostním problému. Personál operačního sálu nemusí vědět o tom, že jsou tóny alarmu vypnuté, jestliže byl přístroj ponechán ve stavu UKONČIT PŘÍPAD. K tomu může dojít spíše v případě urgentních operací a tehdy, jestliže chirurgické týmy nebyly seznámeny s provozem monitoru.

Pokud ve vaší nemocnici používáte perioperační funkci ZAHÁJIT/UKONČIT PŘÍPAD, doporučujeme, abyste lékaře instruovali, že se mají seznámit s touto funkcí, jak je popsána v provozní příručce v části týkající se perioperačních funkcí. Zvláště by měli vědět, jak se potvrzuje stav tónů alarmů před zahájením nového případu. Přikládáme kopii této části příručky.

V současnosti pracujeme na upgradu našeho softwaru tak, aby byl stav zvukových alarmů lépe viditelný. Jakmile bude dokončena validace, budeme vás kontaktovat, abychom si naplánovali vzájemně vyhovující čas naší návštěvy ve vaší nemocnici a bezplatné aktualizace vašich monitorů.

Máte-li k tomuto nápravnému řešení jakékoli otázky, obraťte se na společnost Puro-Klima, pana Martina Vyhnálka, na adrese Štěchovická 2266/2, Praha 100 00, Česká republika, nebo na telefonním čísle +420 247 277 734 či e-mailu [mvyhnalek@puro-klima.cz](mailto:mvyhnalek@puro-klima.cz).