


Hørsholm, 12. září 2011

## NALÉHAVÉ BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ K PROVOZNÍ LAMPE XO NA JEDNOTCE XO 4

Nekdy dochází bohužel k tomu, že se poškodí reflektor a následně se uvolní z lampy. Aby nedošlo k úrazu, vyvinuli jsme bezpečnostní fólii, kterou laskave připevníte na zadní stranu reflektoru, jak je videt na následující fotografii. Viz též připojené pokyny.

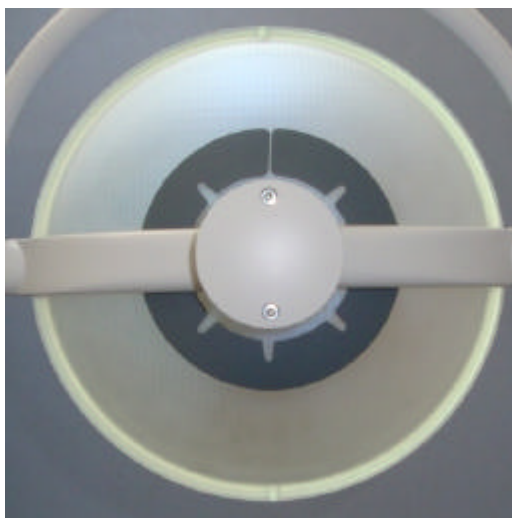

Až bezpečnostní fólii připevníte, prosím vyplňte a zašlete zpět připojenou „přílohu 1“ k XO CARE A/S jako doklad o tom, že jste toto opatření učinili.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce nebo servisního technika XO, popřípadě napište na adresu [morten.loewe-hansen@xo-care.com](mailto:morten.loewe-hansen@xo-care.com) nebo [daniel.profitlich@xo-care.com](mailto:daniel.profitlich@xo-care.com).

Príslušné orgány byly o tomto preventivním opatření informovány.

S pozdravem

Kim Sørensen, CEO  
XO CARE A/S



## **Pokyny pro instalaci Instalace bezpečnostní fólie MG-979**

Než začnete s instalací, musí být jednotka XO 4 vypnutá a reflektor musí být vychladlý.

1. Vycistete středovou část zadní strany reflektoru lihem. Počkejte asi minutu, než se líh odparí.
2. Sejmete prostřední díl ochranného papíru.



3. Vložte fólii pod oblouk tak, aby byla uprostřed a prostřední výrez se kryl s chladicími otvory lampy.




4. V místě, kde jste odstranili ochranný papír, fólii přitlačte.



5. Zatažením za jeden jazýček ochranný papír částečně – něco přes polovinu – stáhnete, fólii znovu uložte pod oblouk a přitisknete na místo; současně sejmete zbývající část ochranného papíru z opačné strany.



6. Totéž provedte na druhé straně.
7. Dokoncete pečlivým uhlazením celé lepicí části tak, aby fólie hladce přiléhala k celému povrchu.
8. Tím je instalace hotová.

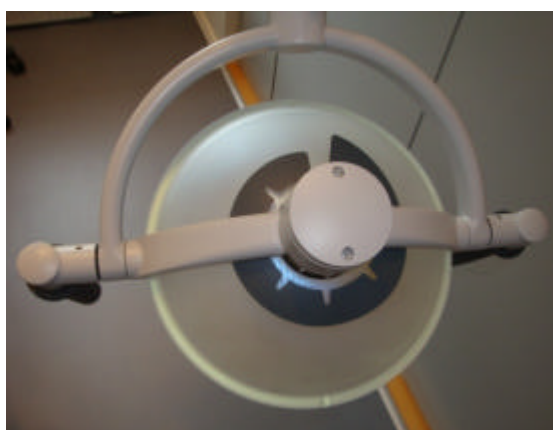

## Príloha 1

Níže podepsaný tímto stvrzuje, že na provozní lampu XO nainstaloval bezpečnostní fólii.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

---

Vyplní DDS/technik

Výrobní číslo (XO 4)	
Datum výroby	
Distributor	
Koncový uživatel (jméno)	
Ulice	
Mesto	
PSC	
E-mail	
Fólie nainstalována dne (datum)	

Vyplněnou přílohu zašlete laskave zpět do pěti pracovních dnů.  
Můžete ji buď odfaxovat, nebo naskenovanou kopii poslat elektronickou poštou:

FAX: +45 70 20 55 10

E-mail: [safetyfoil@xo-care.com](mailto:safetyfoil@xo-care.com)

XO CARE A/S  
Håndværkersvinget 6  
2970 Hørsholm

