

Vážení zákazníci,

dovolte nám Vás seznámit s novým doporučením při čistění a dezinfekci lanka Albaranova můstku u vašeho přístroje – dětského duodenoskopu Olympus PJF-160.

Vzhledem k malému průměru kanálu pro toto lanko je třeba věnovat zvýšenou péči jeho čistění a následné dezinfekci. Doporučujeme proto tento postup :

1. Manuální dekontaminace přístroje po vytažení z pacienta (plně v souladu s platnou vyhláškou),
2. Manuální vyčistění povrchu a prokartáčování všech kanálů,
3. Propláchnutí čistícím roztokem kanálu pro Albaranův můstek pomocí adaptéru se stříkačkou (dle originálního návodu),
4. **Zaplnění dezinfekčním roztokem kanálu pro Albaranův můstek pomocí adaptéru se stříkačkou a vyčkání předepsané doby expozice pro daný dezinfekční roztok.**

Teprve takto manuálně ošetřený endoskop můžeme vložit do systému ETD.

Pro uživatele ETD3Plus :

- používáte-li Flow Control (FC), požádejte náš servis o vyrušení FC pro tento kanál; v opačném případě bude FC hlásit chybu a automatické přerušení programu

Pro uživatele ETD3 :

- program beze změn

Pro uživatele ETD2, ETD2Plus:

- program beze změn

Pro uživatele miniETD a miniETD2 :

- program beze změn

V případě dotazů prosím kontaktujte svého místního partnera Olympus, který Vám s potěšením bude nápomocen nebo zařídí vše potřebné.

Děkujeme za pochopení.

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Příloha: - Odpovědní formulář



Odpovědní formulář

Zašlete, prosím, vyplněný a podepsaný odpovědní formulář **do 31.8.2011** poštou, faxem nebo digitálně naskenovaný na:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Servis zdravotnické techniky
Evropská 176/16
160 41 Praha 6

Telefon: 221 985 393
Fax: 221 985 574
E-mail: kolibacova@olympus.cz

Kompatibilita myček-dezinfektorů série Olympus ETD a dětského pediatrického duodenoskopu Olympus PJF-160

Vážení,

tímto potvrzujeme přijetí Vašeho dopisu pro zákazníky. Porozuměli jsme doporučením výrobce a budeme se jimi řídit.

Jméno kontaktní osoby: _____

Nemocnice: _____

Oddělení: _____

Ulice: _____

PSČ / Město: _____

Datum

Podpis