

### **Informace týkající se nulového odečtu (0,0 mmol/L) nebo 0 mg/dL) na analyzátorech HemoCue<sup>®</sup> Glucose 201+ se softwarovou verzí 106 nebo nižší.**

Ve velmi vzácných případech mohou analyzátory se softwarovou verzí 106 nebo nižší zobrazit hodnotu 0,0 mmol/L (nebo 0 mg/dL) dokonce i v případě, kdy je skutečná koncentrace glukózy ve vzorku vysoká. Může k tomu dojít pouze v situaci, kdy je vzorek s extrémně vysokou koncentrací glukózy (na displeji zobrazeno HHH) naměřen přímo po měření s prázdným držákem kyvet.

Když jsou přístroje HemoCue<sup>®</sup> Glucose 201+ používány v souladu s pokyny v návodu, nemůže k tomu dojít. Přesto se však chce společnost HemoCue<sup>®</sup> ujistit, že jste řádně informováni o možném výskytu nulových odečtů, aby se předešlo chybné interpretaci výsledků.

V případě zobrazení nulové hodnoty je třeba analyzátor vypnout a znovu zapnout a měření zopakovat.

Chcete-li zjistit, zda je softwarová verze Vašeho analyzátoru 106 nebo nižší, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte analyzátor. Zobrazí se spouštěcí obrazovka se všemi symboly a znaky, které může ukazovat.
2. Po 2 až 3 sekundách se na krátkou dobu zobrazí třímístné číslo. Toto číslo je softwarová verze analyzátoru. Pokud je zobrazené číslo 106 nebo nižší, spadá softwarová verze do tohoto omezení.