

Informace pro zákazníka

Dodatek v příloze k měření CO₂/EtCO₂ u přístroje HeartStart MRx

Vážení obchodní partneři,

cílem tohoto dopisu je informovat Vás o tom, že společnost Philips poskytuje v příloze dodatek k návodu k obsluze HeartStart MRx, aby zajistila, že zákazníci rozumí měření CO₂/EtCO₂ u přístroje HeartStart MRx. Dodatek je konkrétně určen pro zákazníky vlastníci přístroje MRx se zařízením využívajícím softwarovou verzi F.02, R.02, 9.xx nebo dřívější verze pro popis funkce CO₂/EtCO₂, když hladiny CO₂ u pacienta klesnou na velmi nízké úrovni a popisuje co dělat, když takováto situace nastane.

Pokud budete mít dotazy nebo připomínky, obraťte se na místního zástupce společnosti Philips: <Kontaktní údaje zástupce společnosti Philips musí vyplnit KM/země>.

S pozdravem,

Ing. Bayer Milan

Vedoucí servisního oddělení
S&T Plus s.r.o.

Příloha

Informace pro zákazníka

DOTČENÉ VÝROBKY	Výrobky: Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx, modely M3535A, M3536A, M3536M, M3536MC, M3536M2, M3536M4, M3536M5, M3536M6 • v provedení A03, A04, A05, A06 nebo A11 NEBO • M3532A (aktualizace EtCO₂). Dotčené přístroje: Výše uvedené přístroje HeartStart MRx dodané mezi únorem 2004 a lednem 2012 se softwarovou verzí R.02, F.02, 9.xx nebo kteroukoli z dřívějších verzí. Vyrobena společností: Philips Healthcare, 3000 Minuteman Road, Andover, MA, 01810.
POPIS PROBLÉMU	Rozsahy měření Návod k obsluze přístroje HeartStart MRx byl opraven, aby lépe objasňoval měření CO₂/EtCO₂ prováděná přístroji MRx se softwarovými verzemi F.02, R.02, 9.xx nebo dřívějšími.
JAK ZJISTIT DOTČENÉ VÝROBKY	Abyste zjistili, které jednotky byly dotčeny, najděte číslo provedení na primárním označení na zadní straně přihrádky baterie B přístroje MRx.
DOPORUČENÍ OPATŘENÍ PRO ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE	Prostudujte si přiložený dodatek k návodu k obsluze přístroje HeartStart MRx. Zajistěte, aby byli všichni uživatelé plně proškoleni pro přístroj MRx a konkrétně si prostudovali a pochopili zde poskytované dodatečné informace.
OPATŘENÍ PLÁNOVANÁ SPOLEČNOSTÍ PHILIPS	Společnost Philips rozesílá dodatek k návodu k obsluze přístroje HeartStart MRx týkající se měření CO₂/EtCO₂ všem dotčeným zákazníkům.
DALŠÍ INFORMACE A PODPORA	Jestliže potřebujete jakékoli další informace nebo podporu v souvislosti s tímto problémem, obraťte se na místního zástupce společnosti Philips <Kontaktní údaje zástupce společnosti Philips musí vyplnit KM/země>.