

Pokyny k vyhledání sériového čísla čerpadla/čerpadel Continuum

⚠ VÝSTRAHA: Pokud je čerpadlo na vyšetřovně MR, nikdy ji **NEVYTAHUJTE** z držáku ani **nevytahujte držák z IV stojanu**. Čerpadlo obsahuje feromagnetický materiál a může být přitahováno k magnetu. Před vstupem do vyšetřovny MR zkontrolujte pevné uchycení zatažením za spodní část čerpadla, aby se zabránilo možnému zranění nebo poškození zařízení.

Sériové číslo je umístěno na boční nebo na zadní straně čerpadla.




Pro bezdrátové čerpadlo platí následující pokyny: 3015550 a bezdrátový držák: 3015547.


Vynětí čerpadla z držáku

1. Před vynětím čerpadla/čerpadel z držáku přemístěte systém mimo vyšetřovnu MR.

2. Je-li v systému více než jedno čerpadlo, oddělte držáky uvolněním přídržných otočných knoflíků (umístěných na zadní straně držáku). Dostatečně oddalte držáky (odsuňte je od sebe na stojanu), abyste mezi ně mohli vsunout šroubovák. Utáhněte přídržné otočné knoflíky, aby držáky nespadly. Je-li systém instalován na monitor MEDRAD Veris®, budete pravděpodobně potřebovat odstranit horní část IV stojanu uvolněním otočného knoflíku pro nastavení výšky a vytažením otočného knoflíku dopředu.

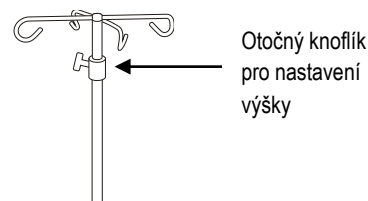

3. Ujistěte se, že je čerpadlo uchyceno v držáku, aby nemohlo po uvolnění přídržného šroubu upadnout. Uvolněte přídržný otočný knoflík na dolní straně držáku. (Viz nákres vpravo.)

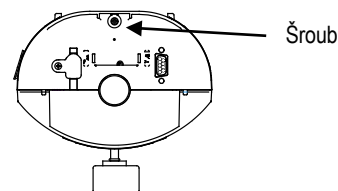

4. Otočením vyjměte dolní část čerpadla z držáku.

5. Vysuňte úchytky na stranách čerpadla zespod drážek na straně držáku.

6. Opakujte kroky 3 až 5 pro každé čerpadlo v systému.


7. Sériové číslo je umístěno na boční nebo na zadní straně čerpadla.

Instalace čerpadla do držáku

Poznámka pro uživatele vzdáleného displeje: Pokud se z IV stojanu odstraní jakékoli držáky, zajistěte, aby byly zpětně instalovány ve stejném pořadí, v jakém byly původně nainstalovány.


⚠ VÝSTRAHA: NEPŘEMISŤUJTE držáky na stojanu ani je nezaměňujte za držáky z jiných stojanů. Stojany a držáky jsou konfigurovány pro vzdálený displej a na základě této konfigurace probíhá jejich ovládání. Pokud se pomocí vzdáleného displeje ovládá čerpadlo v nesprávném držáku, může dojít k vážnému zranění pacienta.

1. Držte čerpadlo přední stranou směrem ven. Nakloňte horní část čerpadla směrem k držáku asi v úhlu asi 20°. Vložte horní část čerpadla do držáku. Vysuňte úchytky na bocích čerpadla nahoru a zasuňte je pod drážky na bocích držáku. (Viz náčrt 1).

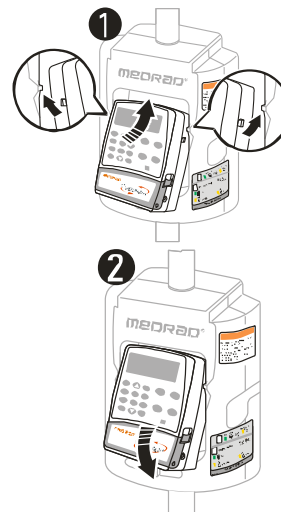

2. Otočením vložte dolní část čerpadla do držáku. (Viz náčrt 2). Ujistěte se, že jsou všechna čerpadla uchycena v držácích, aby nemohla upadnout v době, než bude utažen přídržný šroub.

3. K utažení šroubu, a tím k upevnění čerpadla na dolní části držáku, použijte šroubovák. Neutahujte nadměrně. (Viz náčrt 3).

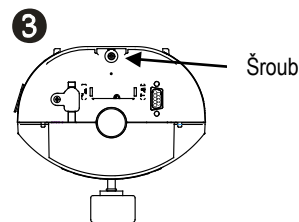

4. Pevné uchycení zkontrolujte zatažením za dolní část čerpadla.
5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každé čerpadlo v systému.
6. Uvolněte přídržný otočný knoflík na jeden z držáků a posuňte držák nahoru nebo dolů tak, aby se dostal do těsné blízkosti sousedního držáku. Ujistěte se, že konektor v horní části dolního držáku pevně sedí v konektoru v dolní části horního držáku.
7. Opakujte krok 6 pro třetí držák, používáte-li jej.
8. Pokud byl odstraněn, nasadte zpět horní díl IV stojanu a nastavte výšku.