

## Důležité oznámení pro zákazníky

TUTO INFORMACI ZPROSTŘEDKUJTE VŠEM  
PŘÍSLUŠNÝM UŽIVATELŮM PŘÍSTROJE A CELÉMU  
BIOMEDICÍNSKÉMU PERSONÁLU



## **Provoz přístroje na NO-terapii v kombinaci se systémem datového managementu pacientů**

Při provozu přístroje na NO-terapii se systémem datového managementu pacientů (PDMS) přes rozhraní COM-1 zaznamenal jeden z uživatelů, že došlo při použití k odpojení terapeutického přístroje.

**(se současnou aktivací nouzového dávkování)**

Přešetřením se zjistilo, že za určitých podmínek (přebootování medicínského PC při zapojeném datovém propojení) se mohou vyskytnout problémy v komunikaci s použitým medicínským PC (HERCULES Medical ETX od firmy Penta GmbH)

Aby se po vzniku této situace dal přístroj na NO-terapii opět zapnout, musí se nejdříve odpojit kabelové propojení od medicínského PC, příp. od NO-A COM1.

Po opětovné aktivaci (a inicializaci) se dávkování musí **okamžitě** znovu spustit - při současné kontrole správnosti nastavení.

Následně lze znovu obnovit datové propojení prostřednictvím COM 1. Problém se zkoumá a jakmile bude k dispozici řešení problému, budeme Vás okamžitě informovat.



**Do té doby Vám nedoporučujeme používat přístroj na NO-terapii se systémem PDMS.**

**Opětovně upozorňujeme na nutná opatření uvedená v návodu k použití k zabezpečení zásobování NO při neočekávaném přerušení zásobování.**

.....  
Hans Erdmann  
(jednatel)

.....  
Rolf Schiffmann  
(Quality Manager)