



Terumo[®] Advanced Perfusion System 1

Odstředivá řídicí jednotka

Doplněk

Tento Doplněk obsahuje informace týkající se nastavení a použití odstředivé řídicí jednotky System 1.

Tento Doplněk mění část Odstředivá řídicí jednotka.

Příprava

VÝSTRAHA: Nezajištění záložního způsobu čerpání, buď záložním válečkovým čerpadlem nebo ruční čerpací jednotkou, může vést k těžkému poškození nebo úmrtí pacienta. Silně doporučujeme připravit záložní čerpadlo a protokol.

Doporučujeme v kardiopulmonálním bypassu používat jednosměrný ventil bránící zpětnému toku krve v arteriálním vedení.

Nouzové postupy

V případě zastavení motoru odstředivé ovládací jednotky by uživatel měl:

- Uzavřít arteriální a žilní vedení svorkami.
 - o Přerušit podtlakově podporovanou žilní drenáž, pokud je použita.
 - o Uzavřít všechna proplachovací a necirkulační vedení, aby se minimalizovala možnost vniknutí vzduchu a zpětného toku do okruhu CPB.
- V případě potřeby zastavit kardioplegické čerpadlo, aby se minimalizovala možnost vniknutí vzduchu.
- Obnovit arteriální průtok pomocí záložního zařízení, buď ručního nebo válečkového čerpadla, ve shodě s protokolem nemocnice.
 - o Další informace o problémech s odstředivou ovládací jednotkou uvádí Část 6 Provozní příručky.



Terumo Cardiovascular Systems Corporation
Ann Arbor, Michigan 48103-9300
(734) 663-4145 or (800) 262-3304 for technical information.
(800) 521-2818 for ordering information.



Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium

AU Sponsor Terumo Corporation Australian Branch
NSW 2113, Australia

Terumo Corporation
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo 151-0072, Japan

825739 R/A
June, 2012