

Vážený majiteli defibrilátoru Philips HeartStart FRx:

Jako součást našeho přispění k co největší spolehlivosti a jednoduchosti našich přístrojů určila společnost Philips, že je důležité objasnit informace v *Uživatelské příručce* a informovat Vás o údržbě Vašich automatických externích defibrilátorů (AED) HeartStart FRx.

Jedno pípnutí

Pokud Váš automatický externí defibrilátor FRx vydává vzorec *jednoho pípnutí* (♪ ... ♪ ... ♪ ...), stiskněte prosím modré i-tlačítko na přední straně přístroje, abyste získali informace. Váš automatický externí defibrilátor Vám přesně sdělí, jaké kroky podniknout, abyste zajistili připravenost přístroje k použití.

Tři pípnutí

Pokud Váš automatický externí defibrilátor FRx nebo HS1 kdykoli během své životnosti vydal nebo začíná vydávat vzorec *tří pípnutí* (♪♪♪ ... ♪♪♪ ... ♪♪♪ ...), je důležité, abyste přístroj vyřadili z provozu a kontaktovali svého místního zástupce společnosti Philips – společnost S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, dispečink servisu: 239 047 505, email: servis@sntplus.cz. Pokud automatický externí defibrilátor FRx AED vydává vzorec tří pípnutí, je to signál, že přístroj vyžaduje průzkum společností Philips, aby bylo zajištěno, že je přístroj připraven k použití. Samozřejmě, pokud je naléhavá potřeba jeho použití, podnikněte veškeré kroky, abyste odstranili chybu a používejte přístroj normálním způsobem, jak je popsáno v uživatelské příručce. Přestože se Vám podařilo chybu odstranit, je důležité, abyste kontaktovali společnost S & T Plus, abyste získali nástroje a informace k zajištění správné funkčnosti přístroje.

Obrázek na zadní straně tohoto dopisu slouží jako názorná ukázka toho, jaké kroky podniknout v případě jednoho pípnutí nebo tří pípnutí. V souladu s tím aktualizujte své protokoly údržby. Společnost Philips navíc vytvořila webové stránky s dalšími informacemi o této akci. Abyste si poslechli rozdíl mezi jedním pípnutím a třemi pípnutími vydávanými Vaším automatickým externím defibrilátorem, navštivte prosím naše webové stránky na adrese www.philips.com/HeartStartMaintenanceAdvisory.

Je pro nás velice důležité, abyste byli spokojeni s výrobky společnosti Philips i naším řešením této situace. Pokud budete potřebovat další informace o tomto upozornění, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Philips – společnost S & T Plus s.r.o.

S pozdravem,


Ing. Milan Bayer

Vedoucí servisního oddělení.

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994/138

142 21 Praha 4

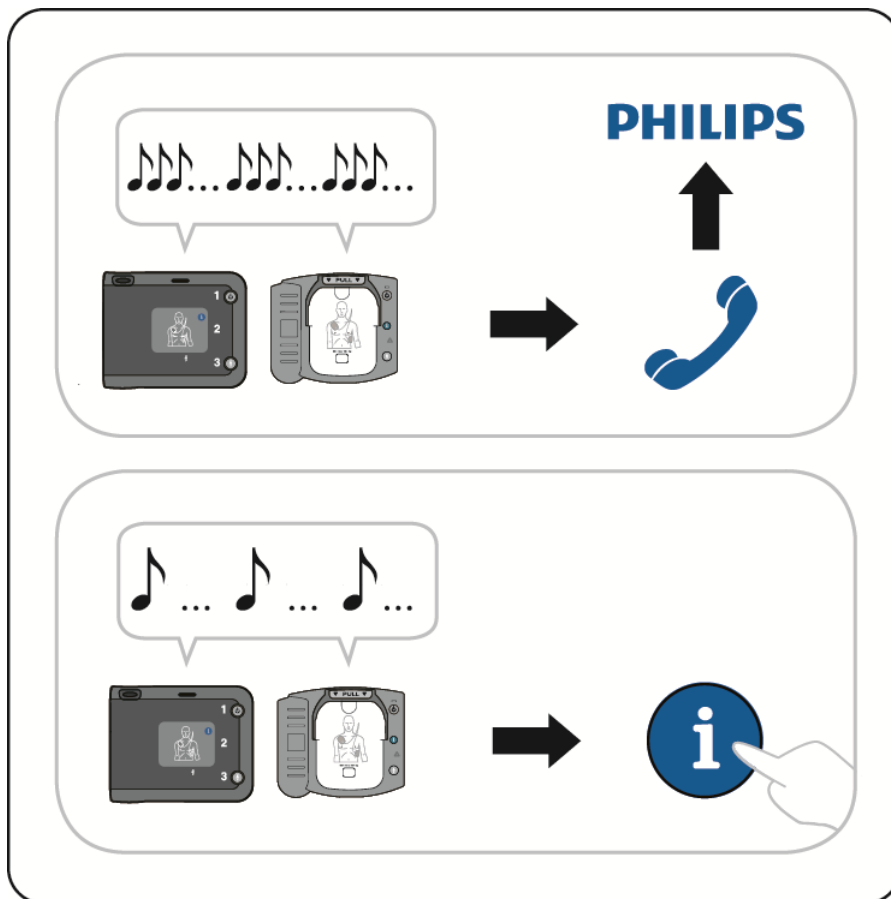

Pokud váš automatický externí defibrilátor vydává vzorec jednoho pípnutí, stiskněte prosím modré i-tlačítko na přední straně přístroje, abyste získali informace. Pokud váš automatický externí defibrilátor někdy vydal nebo začíná vydávat vzorec tří pípnutí, zavolejte prosím svému místnímu zástupci společnosti Philips (S &T Plus s.r.o.) , abyste získali technickou podporu.