



NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GE Healthcare

Healthcare Systems
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA

Interní č.j. GE Healthcare: 74052, 74053

3. února 2012

Určeno: Ředitel nemocnice / manažer rizik
Biomedicínská technika
Vedoucí diagnostického ultrazvukového oddělení

VĚC: **Vysoká teplota sondy u systému GE LOGIQ P6.**

Společnosti GE Healthcare byl nedávno oznámen bezpečnostní problém spojený s vaším systémem LOGIC P6, který by mohl mít vliv na bezpečnosti pacientů. **Zajistěte prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení.**

Bezpečnostní problém Systém GE Logic P6 může způsobovat přehřátí sondy, což může pacientům i obsluze způsobit popáleniny.

Informace o příslušném výrobku GE LOGIQ P6 BT09 a DIAGNOSTICKÝ ULTRAZVUKOVÝ SYSTÉM BT11.

Bezpečnostní pokyny Přestaňte, prosím, používat tento systém pro vyšetřování pacientů.

Nápravné opatření GEHC problém zdarma vyřeší opravou.

Kontaktní informace Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně tohoto problému, kontaktujte, prosím, místního zástupce GE Healthcare nebo se obraťte telefonicky na místní online zákaznické centrum.

Electric Medical Service s.r.o. / GE authorised ultrasound distributor/
Tel: +420 543 524 381

Společnost GE Healthcare potvrzuje, že byly uvědoměny příslušné regulační úřady.

Ujišťujeme Vás, že udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality je naší nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, laskavě se na nás neprodleně obraťte.

Děkuji,

James Dennison
Viceprezident QARA
GE Healthcare Systems

William Denman, M.D., FRCA
Chief Medical Officer
GE Healthcare