

Naléhavé bezpečnostní upozornění

Předmět: Liko® Stropní a mobilní zvedáky—Standard SlingBar™ 450

Identifikátor FSCA: Mod 486

Typ akce: Modifikace zařízení

Datum:

Komu: generální ředitel, správce podniku, technik podniku, manažer dozoru
biomedicínské inženýrství, dispečer lékařského zařízení

Dotčená zařízení: Standard SlingBar™ 450, čísla výrobků: 20090029, 20190024, 20190041, 31190015, 31290017, 31290043, 3156001, 3156003, 3156007, 3156014, 3156016, 31590043 or 5019013 **v distribuci od ledna 1980 do listopadu 2012**


Výrobky s těmito čísly jsou dodávány společně se zvedáky Golvo řad 1000, 3000 a 7000, Viking M, Viking L, LikoLight 100 & 125, CAROLI 101 A UNO 100, 101 & 102.

Popis situace:

Hill-Rom zjistila bezpečnostní problém související se stojany Standard SlingBar™ 450, jež může být dodáván s různými stropními a mobilními zvedáky Liko. Hrozí vážné poranění pacienta, pečovatele nebo blízko stojící osoby v důsledku sklouznutí nebo jiného pádu na tyč smyčky, obvykle ve chvíli, kdy je zvedák zaparkovaný nebo uložený, není-li využíván. Hák smyčky na konci tyče smyčky může způsobit propíchnutí tělesné části jako je hlava, rameno nebo třísla.

Vyskytlo se pět závažných zranění v důsledku sklouznutí nebo pádu osob na tyč smyčky. Dále se vyskytlo jedno vážné poranění v důsledku toho, že osoba vylezla na zvedák/hrála si s ním. S těmito nehodami nesouvisí žádné poruchy zařízení.

Hill-Rom vyvinula bezpečnostní kryt tyče na smyčku, jež tato rizika zmírní (viz ilustraci na následující stránce).

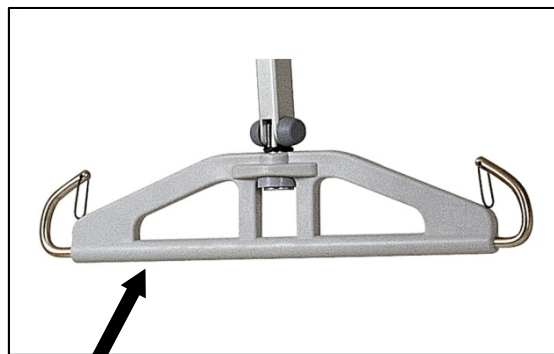

Týká se to POUZE této tyče na smyčku.



Univerzální tyče na smyčku se to NETÝKÁ.

Akce, které má uživatel provést:

K tomuto upozornění je připojen **odpovědní formulář**. Zadejte počet háků pro závěsné tyče, které potřebujete, formulář co nejdříve **vyplňte a zašlete společnosti Hill-Rom** a my vám zdarma zašleme příslušný počet sad.

Nadále dodržujte bezpečnostní postupy zvedání a nedovolte neoprávněným osobám, zejména pak dětem, aby se hráli v okolí zvedáku či s ním manipulovali.

Distribuce tohoto bezpečnostního upozornění:

Předejte kopii tohoto dopisu všem dalším příslušným osobám ve vašem zařízení.

Udržujte povědomí o tomto oznámení a o výsledné akci po požadovanou dobu, aby byla zajištěna účinnost nápravné akce.


Společnost Hill-Rom potvrzuje, že o této bezpečnostní nápravné akci byly informovány příslušné úřady.

Kontaktujte odpovědnou osobu:

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto Bezpečnostní upozornění pro zákazníky, obraťte se prosím na oddělení technické podpory společnosti Hill-Rom:

S pozdravem,

Oddělení technické podpory společnosti Hill-Rom

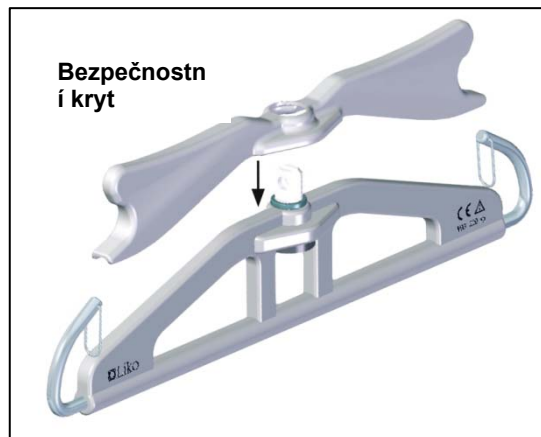

Ilustrace bezpečnostního krytu

Odpovědní formulář

**Předmět: Liko® Stropní a mobilní zvedáky—Standard SlingBar™ 450
(MOD 486)**

Vyplňte prosím následující položky správnými údaji a **zašlete tento odpovědní formulář ihned zpět** technické podpoře společnosti Hill-Rom. Podrobné pokyny najdete v dolní části této stránky. Děkujeme.

Číslo účtu společnosti Liko: _____

Název zařízení: _____

Adresa zařízení: _____

Město: _____ Stát: _____ PSČ: _____

Oficiální název zařízení: _____

Vyplňte čitelně

Podpis: _____

Pracovní pozice: _____ Datum: ____/____/____ Telefon: _____

Fax: _____

Označte provedenou akci:

☐

Nemáme žádné dotčené výrobky.

☐

Potřebujeme _____ bezpečnostních krytů, abychom mohli opravit všechny výrobky v našem zařízení.

Co nejdříve,
prosím odešlete FAXEM nebo e-mailem tento formulář na: