

Uchovejte si tyto bezpečnostní informace spolu s návodem pro použití Glidescope



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ

Pro zajištění bezpečnosti pacientů provádějte rutinní kontrolu videolaryngoskopické lžice Glidescope před a po každém použití a zkontrolujte, zda není povrch laryngoskopické lžice hrubý, nevyskytují se na něm ostré hrany, praskliny, výstupky nebo jiné známky opotřebení. Pokud takové známky objevíte, poškozenou nebo opotřebovanou laryngoskopickou lžici nepoužívejte, jinak může dojít k jejímu zlomení a následnému zranění nebo úmrtí pacienta.

- Vždy se ujistěte, že jsou ihned k dispozici alternativní metody zajištění dýchacích cest a alternativní vybavení.

Pokyny ke kontrole

1. Pravidelně kontrolujte opakovaně použitelné videolaryngoskopické lžice Glidescope před a po každém použití, abyste odhalili jakékoli poškození nebo opotřebení, které by mohlo vést ke zlomení (viz příklady na druhé straně). Je kriticky důležité, abyste prováděli pravidelné kontroly po celou dobu životnosti výrobku, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pacienta.
2. Ihned přestaňte výrobek používat, pokud při kontrole objevíte některou z následujících závad:
 - hrubý povrch
 - výstupky
 - ostré hrany
 - rozštěpení povrchu
 - praskliny
 - separace skeletu
3. Jakékoli podezření na vadu laryngoskopické lžice oznamte zákaznickému centru společnosti Verathon:

Telefon: +31 30 68 70 570

E-mail: customercareEU@verathon.com

Viditelné známky poškození nebo opotřebení

Poškození a opotřebení, která mohou mít dopad na bezpečnost výrobku, jsou zobrazena uvnitř červeně zakroužkovaných oblastí a jsou výsledkem zrychleného cyklického testování selhání výrobku, které simuluje nejhorší scénář použití (konec životnosti).


Degradace povrchu



Popraskání



Prasknutí okénka kamery

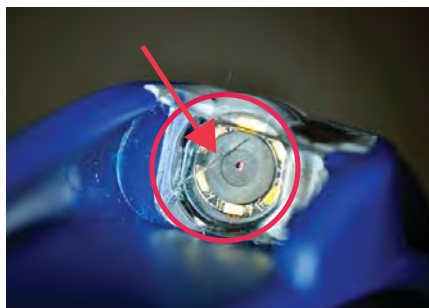

Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce Glidescope.



Firemní centrála:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, Spojené státy
Tel.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896

 **Výrobce:**
Verathon Medical (Kanada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, Britská Kolumbie
Kanada, V5C 5A9

 **Zástupce pro EU:**
Verathon Medical (Evropa) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Nizozemsko
Tel.: +31 30 68 70 570
Fax: +31 30 68 70 512

Glidescope, symbol Glidescope, GVL, Verathon a symbol pochodně Verathon jsou obchodní značky společnosti Verathon Inc. ©2013 Verathon Inc. Videolaryngoskopické systémy Glidescope nesou označení CE v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích a systém jakosti společnosti Verathon Inc. je certifikovaný systém jakosti podle norem ISO 13485:2003.