
Bezpečnostní upozornění

Předmět: Elektrická postel Hill-Rom™ 900 —Volitelné rozšíření rámu postele

Identifikátor FSAC: Mod 1201

Typ akce: Modifikace zařízení

Datum:

Komu: generální ředitel
správce podniku
technik podniku
manažer dozoru
biomedicínské inženýrství
dispečer lékařského zařízení

Dotčené produkty:

Modely: HR900A s možností rozšíření rámu postele

Rozsah dotčených výrobních čísel: HRP001435410 až HRP002027395

Data výroby: 01.07.10 až 31.03.11

Popis situace:

Hill-Rom zjistila potenciální bezpečnostní problém u některých elektrických postelí HR900. Volitelné prodloužení rámu postele se nemusí zapadnou ve svém zcela vysunutém bodě, což může způsobit odpojení čelní desky/prodloužení od postele a jejich pád na podlahu. To by mohlo způsobit poranění pečovatele.

Způsob řešení:

Zástupce Hill-Rom se na vás obrátí a sjedná si schůzku na opravu postelí.

Dokud k vám nepřijedeme, postupujte následujícím způsobem:

- Informujte personál, aby **nepoužíval** funkci prodloužení rámu postele.
- Pokud prodloužení postele použít musíte, dávejte maximální pozor, rám vytahujte pomalu a poslouchajte, zda uslyšíte kliknutí ve chvíli, kdy rám zapadne. Zkontrolujte, zda se na místě zajistí. Pokud máte nejasnosti ohledně používání této funkce, přečtěte si Uživatelskou přezdívkou.
- Pokud jste některé postele uvedené v tomto seznamu pronajali nebo prodali, zašlete prosím kopii tohoto dopisu novým uživatelům a obraťte se na svého zástupce a informujte nás o novém umístění postelí či nových vlastních.

Distribuce tohoto bezpečnostního upozornění:

Předejte toto upozornění všem osobám ve vaší organizaci a/nebo jakékoli další organizaci, pokud s těmito zařízeními pracují.

Udržujte povědomí o tomto oznámení a o výsledné akci po požadovanou dobu, aby byla zajištěna účinnost nápravné akce.

Společnost Hill-Rom potvrzuje, že o této naléhavé bezpečnostní nápravné akci byly informovány příslušné úřady.

Kontaktujte odpovědnou osobu:

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se tohoto požadavku nebo popsání postupu, obraťte se na Technickou podporu Hill-Rom:

S pozdravem,

Oddělení technické podpory společnosti Hill-Rom