

**Všem zákazníkům a uživatelům držáků
monitorů Dräger s pružinovým ramenem
– stropní instalace –**

Důležitá bezpečnostní informace!!!

**Stropní instalace Dräger s držákem monitorů
- pokud se držák monitorů zlomí, monitor může spadnout
- tento problém se týká pružinových ramen Ondal AC 2000 dodaných do prosince 2006**

Vážení zákazníci,

Březen 2014

v rámci pravidelného sledování mezinárodního trhu jsme byli informováni o třech případech, kdy došlo k rozlomení sváru v pružinovém ramenu držáku monitorů. Hrozí tak pád monitoru, který může být v nejlepším případě (v závislosti na své hmotnosti) zachycen kabely nacházejícími se v okolí pružinového ramena. Přestože nebylo zaznamenáno žádné zranění, nelze nebezpečí zranění osob nacházejících se pod monitorem vyloučit.

Naše vyšetřování vedené ve spolupráci s výrobcem pružinového ramena odhalilo, že tam, kde docházelo k častému přemísťování monitorů, nebyl svár v pružinovém ramenu v ojedinělých případech schopen dlouhodobě vydržet dynamické namáhání. Týká se to pouze instalací s pružinovým ramenem „Ondal AC2000“ vyrobených do konce roku 2006. Tato bezpečnostní informace se díky technickým modifikacím již nevztahuje na výrobky, které byly dodány později.


Zjistili jsme, že většina těchto pružinových ramen byla již z různých důvodů (např. použití většího monitoru) vyměněna. Přesto Vás chceme požádat o spolupráci při lokalizaci a výměně zbylých pružinových ramen:

- Použijte, prosím, přílohu (obrázky, objednáací a sériová čísla) ke kontrole Vašich stropních instalací a identifikujte dotčená pružinová ramena „AC2000“.
- Pokud takovéto držáky objevíte, informujte, prosím, zástupce společnosti Dräger. Bude Vám provedena bezplatná výměna pružinového ramena.
- Informujte, prosím, personál, že tyto instalace nesmějí být umísťovány nad osoby a že s monitory se do provedení výměny musí manipulovat s velkou opatrností (např. držení monitoru oběma rukama). Zejména nesmí docházet k polohování monitorů za použití síly – je třeba minimalizovat namáhání dolního kloubu pružinového ramena.

Rádi bychom se omluvili za případné nepříjemnosti, které může toto opatření způsobit, ale věříme, že je v zájmu bezpečnosti pacientů a uživatelů.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu společnosti Dräger.

S pozdravem

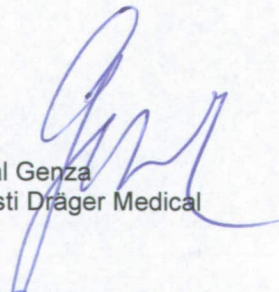

Ing. Michal Genza
jednatel společnosti Dräger Medical

Příloha:
Obrázky pro identifikaci a ověření objednáacího a sériového čísla
Seznam dotčených objednáček a sériových čísel




Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I - 81
101 00 Praha 10



Příklad dotčené instalace:


Monitor s pružinovým ramenem AC2000

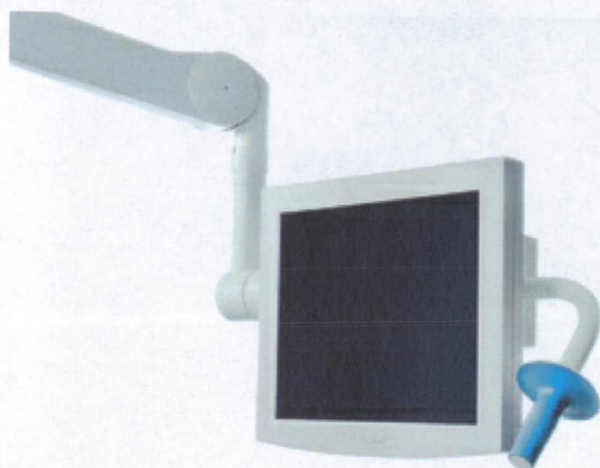

Identifikace dotčených instalací a/nebo pružinových ramen:


Dotčený kloub

Umístění typového štítku

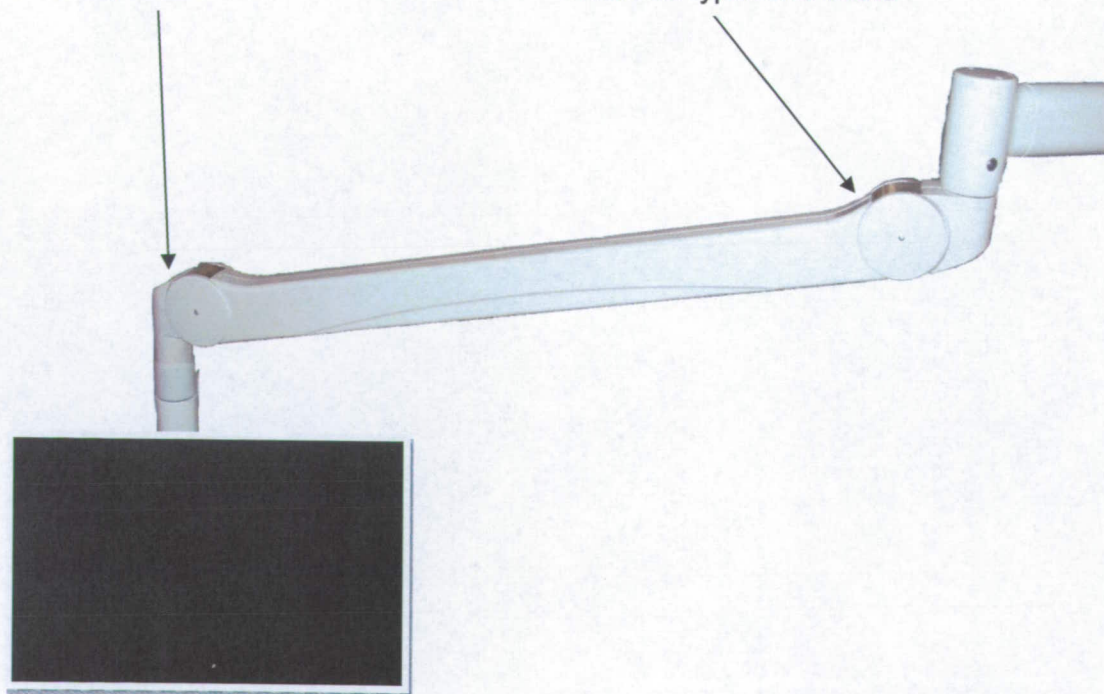

Ověření objednáčích a sériového čísla pružinového ramena:

Sériové číslo výrobce je umístěno v horní části pružinového ramena poblíž horního kloubu (v tomto příkladu je znázorněno objednáčí číslo G18668):

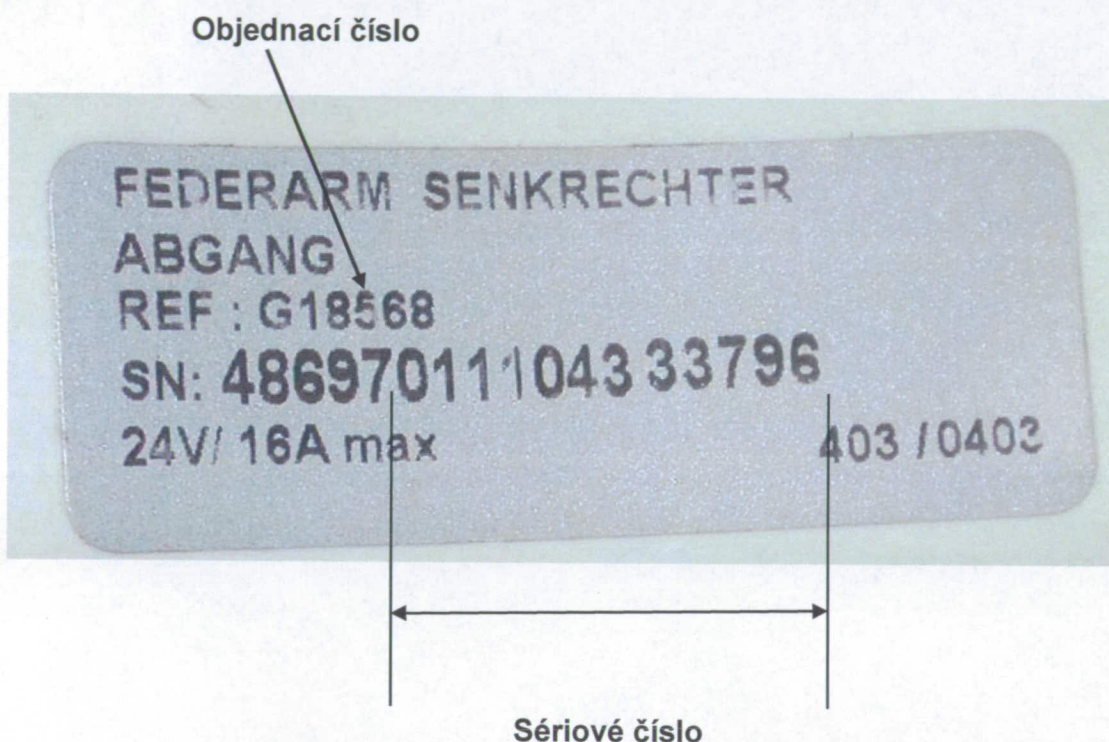

Seznam dotčených objednáčích a sériových čísel

Objednáčí číslo	Popis	Dotčená sériová čísla
G19051	Pružinové rameno pro monitor	Všechna
G19262	Pružinové rameno pro 2 monitory	Všechna
G93358	Pružinové rameno pro displej 13,5-21	Všechna do čísla 0111 066 23639
G93359	Pružinové rameno pro displej 7-12	Všechna do čísla 0111 056 21343