

Uzávěry kapilár Siemens pro RAPIDLyte® Multicap a Multicap®-S

Změna materiálu, která má dopad na použití uzávěrů kapilár

Dle našich záznamů mohla vaše laboratoř obdržet následující produkty Siemens uzávěry kapilár pro použití s našimi Multicap® skleněnými a Multicap®-S plastovými kapilárami pro odběr krve:

Tabulka 1. Uzávěry kapilár

SMN číslo	Popis	Počet v balení	Objednací číslo
10311053	Uzávěry kapilár 100 µl	200	478601
10311054	Uzávěry kapilár 140/175 µl	100	478605
10328655	Uzávěry kapilár 50/60 µl	200	478527

Důvod k bezpečnostnímu upozornění

Rádi bychom Vás upozornili na možné problémy se Siemens uzávěry používané se Siemens Multicap skleněnými a Multicap-S plastovými kapilárami pro odběr krve.

Po obdržení několika stížností zákazníků jsme zjistili, že změna materiálu ze strany dodavatele způsobila, že je obtížnější nasadit tyto uzávěry na kapiláry.

Při pokusu nasadit tyto uzávěry na kapiláry může dojít k vylití vzorku nebo eventuálně k rozbití skleněné kapiláry.

Zdravotní riziko

Riziko spojené s rozbitím skleněné kapiláry je v důsledku tohoto problému mírně zvýšeno. Tato rizika zahrnují potenciální expozici infekčních činitelů v krvi a / nebo zpoždění testování.

Opatření ze strany zákazníka

Siemens doporučuje následující opatření ze strany zákazníka:

1. Siemens doporučuje zvýšení opatrnosti při nasazování uzávěru kapilár u Siemens Multicap skleněných a Multicap-S plastových kapilár za účelem minimalizace možnosti rozbití nebo ohnutí.
2. Prosím, kontaktujte Siemens pokud máte jakékoliv problémy při nasazování uzávěr kapilár na Siemens Multicap skleněné a Multicap-S plastové kapiláry.

3. Vyplňte a zašlete zpět návratku Bezpečnostního upozornění přiloženou k tomuto dopisu.
4. Uschovejte tento dopis ve svých laboratorních záznamech a předejte jej všem, kteří mohli tento produkt obdržet.

Siemens podniká kroky k rychlému vyřešení problému a dodání nových uzávěrů kapilár pro naše produkty k odběru kapilární krve. Předpoklad vyřešení problému a dostupnost nových kapilárních uzávěrů se očekává během následujícího jednoho až dvou týdnů.

Omlouváme se za nepříjemnosti, které mohou tento problém způsobit a děkujeme vám za vaši stálou podporu produktů testování krevních plynů Siemens Healthcare Diagnostics. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto bezpečnostního opatření, prosím kontaktujte místní zákaznické centrum nebo obchodního zástupce společnosti Siemens.

Informace o ochranných známkách

RAPIDLyte a Multicap jsou ochranné známky společnosti Siemens Healthcare Diagnostics.

KONTROLA PŘIJETÍ BEZPEČNOSTNÍHO UPOZORNĚNÍ POC 15-013

Změna materiálu, která má dopad na použití uzávěru kapilár

Tato návratka slouží jako potvrzení o obdržení Siemens Healthcare Diagnostics bezpečnostního upozornění 32320 Rev. A z ledna 2015, týkající se změny materiálu, která má dopad na použití uzávěru kapilár. Prosím přečtěte si otázku a zaznačte příslušnou odpověď. Vyplněnou návratku zašlete na faxové číslo uvedené ve spodní části této stránky nebo na email tereza.kovacikova@siemens.com.

Přečetl(a) jsem si a porozuměl(a) jsem pokynům v tomto upozornění. Ano Ne

Jméno osoby, která vyplnila tuto návratku: _____

Titul: _____

Instituce: _____

Ulice: _____

Město: _____

Stát: _____

Telefon: _____

Země: _____

Prosím odfaxujte tuto vyplněnou návratku na číslo +420 549 211 465. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Siemens.