

Innsbruck 19.02.2014

# LEONHARD LANG

Medizintechnik

Leonhard Lang GmbH, Archengasse 59  
6020 Innsbruck, Austria  
www.LeonhardLang.at  
Tel. +43 512 3342-57 Fax 30 22 70  
Medical@LeonhardLang.at

# LEONHARD LANG

Medizintechnik

Leonhard Lang GmbH, Archengasse 59  
6020 Innsbruck, Austria  
www.LeonhardLang.at  
Tel. +43 512 3342-57 Fax 30 22 70  
Medical@LeonhardLang.at

## Stazeni defibrilacnich elektrod GS

Vazeni zakaznici a uzivatele nasich detiskych defibrilacnich elektrod

GS 04325.2 (DF61 / 50125)  
GS 05120.2 (DF68 / 50531)

Behem interniho vysetrovani vyvolaneho podnety z tlhu bylo zjisteno, ze pri pouzivani techto defibrilacnich elektrod muze dojít k jejich jiskreni a naslednemu selhani. K takovému selhani muze dojít u elektrod starších 2 let.

Mohlo by tak dojít ke zpozděni nebo úplnému vypadku defibrilacního zásahu, který má zachránit život pacienta.  
Fresna přístroja závady je stále předmětem vyšetřování

Interní vyšetřování odhalilo, že k tomuto selhání může dojít u elektrod skladovaných asi 2 roky dle.

Odpovědi šarže techto modelů s expirací delší než 18 měsíců byly staženy našim dopisem v listopadu 2014.  
Tímto preventivně stahujeme i výrobky všech příslušných šarží, které jsou v současné době na trhu a mají expiraci delší než 2 roky.

Uvedené opatření se týká všech elektrod s následujícími čísly šarží:

Customer name	Name of product	Lot number
GS	04325.2 (DF61 / 50125)	30822-0779
GS	04325.2 (DF61 / 50125)	31219-0776
GS	04325.2 (DF61 / 50125)	40507-0773
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	30708-0777
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	30822-0778
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	31006-0773
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	31121-0774
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40107-0771
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40213-0774
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40222-0773
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40320-0770
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40321-0770
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40324-0773
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40522-0779
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40704-0776
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40808-0773
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	40923-0776
GS	05120.2 (DF68 / 50531)	41021-0778

Výrobky techto šarží prosím ubožte odděleně a nepoužívejte.

Dále nám prosím neprodleně nahlasíte počet techto výrobků na skladě nebo v terénu, a to na příloženém formuláři.  
Poté prosím množství elektrod k doplnění zasob si vyžádejte od příslušného distributora. Po chřzení náhradních výrobků stážena kurz očekáváte zlikviduje jejich likvidaci podle písemné na tlavákovem papíře společnosti, s uvedením šarží a množství a potvrzení podpíšíte.

LEONHARD LANG  
Archengasse 59  
6020 Innsbruck, Austria  
www.LeonhardLang.at  
Tel. +43 512 3342-57 Fax 30 22 70  
Medical@LeonhardLang.at



LEONHARD LANG  
Archengasse 59  
6020 Innsbruck, Austria  
www.LeonhardLang.at  
Tel. +43 512 3342-57 Fax 30 22 70  
Medical@LeonhardLang.at



**LEONHARD LANG**  
Medizintechnik

Leonhard Lang GmbH, Aufersweg 56  
F020 Innbruck, Austria  
www.leonhardlang.at  
Tel: +43 512 33 07 32 Fax: 33 22 70  
mailto:leonhard.lang@le

Prosíme také, abyste informovali své zákaznky a zajistili i u nich vyřízení vadných výrobků a nahlášení počtu na příloženém formuláři.

S pozdravem



Leonhard Lang  
Medizintechnik  
Aufersweg 56  
F020 Innbruck, Austria  
Tel: +43 512 33 07 32 Fax: 33 22 70  
www.leonhardlang.at

LEONHARD LANG  
Medizintechnik  
Aufersweg 56  
F020 Innbruck, Austria  
Tel: +43 512 33 07 32 Fax: 33 22 70  
www.leonhardlang.at

