

Příloha B – Pokyny pro kontrolu

Před použitím zkontrolujte roušky podle následujícího postupu:

1. **Obíhající sestra:** podá roušku instrumentářce bez porušení sterility.
2. **Instrumentářka :** rozbalí roušku na sterilním stole (**Obrázek 1**).



Obrázek 1. – Příklad: rouška na rameno nástroje

3. Zkontrolujte roušky pokud jde o skvrny a/nebo voskový nebo mastný omak (**Obrázek 2**). Pokud zjistíte některé z těchto známek, roušku nepoužívejte. Vraťte roušku ISI prostřednictvím standardního reklamačního postupu k vrácení materiálu (RMA).




Rouška se skvrnami/voskovým vzhledem

Čistá rouška

Obrázek 2.

POUZE u roušek pro rameno nástroje a kamery pokračujte následujícími kroky:

4. Najděte hlavní otvor roušky. Nechejte ji otevřenou a jasně označenou pro následné použití (**Obrázek 3**).

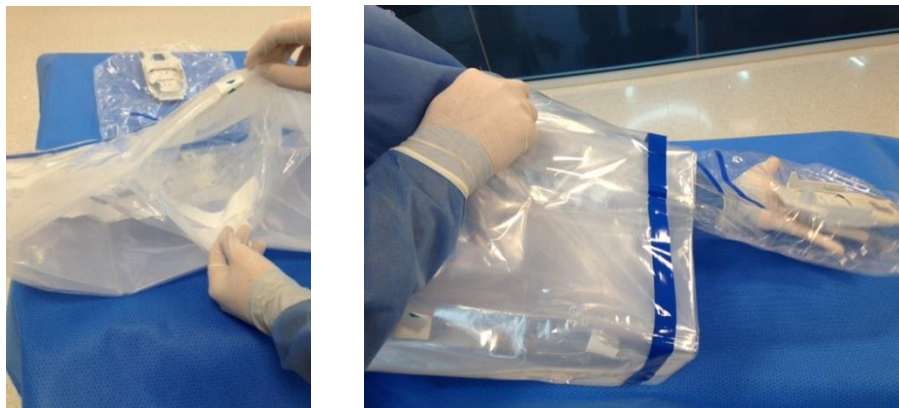

Obrázek 3.

5. Najděte odlepovací štítky, umístěné na horní a na dolní straně hlavního otvoru roušky (**Obrázek 4**).



Rouška nástrojového
ramene

Rouška ramena kamery

Obrázek 4.

6. **(Obrázek 5, krok 1)** Oddělte horní odlepovací štítek podél perforace. **(Obrázek 5, krok 2)** Roztáhněte nejkratnější záhyby roušky tak, aby se ven dostaly vnitřní záhyby roušky. **(Obrázek 5, krok 3)** Zkontrolujte záhyby roušky mezi oddělenými částmi štítku a ověřte si, že je štítek nalepený pouze na nejkratnějších záhybech. Pokud zjistíte, že jsou vnitřní záhyby roušky přilepené ke štítku, roušku nepoužívejte. Vraťte roušku ISI prostřednictvím standardního reklamačního postupu k vrácení materiálu (RMA).



Obrázek 5.

7. Oddělte spodní odlepovací štítek (štítky) podél perforace a opakujte kontrolní krok 6. Pokud jsou některé z vnitřních záhybů roušky přilepené ke štítku, roušku nepoužívejte. Vraťte roušku ISI prostřednictvím standardního postupu oprávnění vrácení materiálu (RMA).
8. Najděte hlavní otvor roušky a ověřte, že má otevřený průchod na sterilní adaptér. Znovu roušku složte a uchopte základnu otvoru palcem a jedním prstem a zkontrolujte, že držíte všechny záhyby roušky, ale hlavní otvor je otevřený. Pokládání roušek provádějte podle příručky pro uživatele systému.